

Användarmanual Mobil personlyft Birdie EVO

Enkel instruktion vid fel. Kolla alltid innan kontakt med REHAB

- **Kontrollera att nödstoppen inte är intryckt.**
- **Kontrollera att laddningssladden ej sitter i eluttaget.**
- **Kontrollera att kablarna till kontrollboxen är rätt anslutna.**
- **Kontrollera att batteriet är laddat.**
- **Rensa hjulen på hår och smuts.**

Användning

Alla personlyftar utprovas individuellt för varje brukare av arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut.

Personlyft är ett hjälpmedel som skall användas när ingen annan förflyttningsteknik är möjlig. Med undantag vid akuta fall.


Vid användning av personlyft krävs rätt lyft och rätt sele till varje brukare.

All personal som använder personlyft skall ha fått instruktion om hur personen skall förflyttas och hur personlyften skall hanteras.

Två personal bör vara närvarande vid lyft. En vid lyften och en vid personen.


Förflyttningsavståndet med en personlyft skall vara så kort som möjligt.

Var observant på att öglorna på selen hakas på rätt.

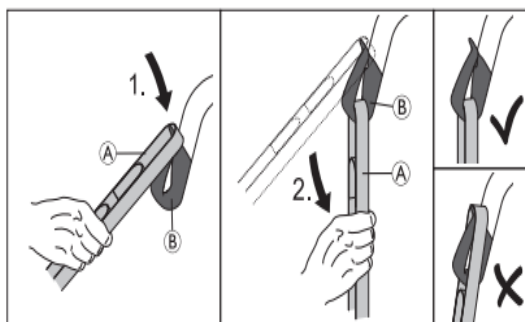


Nödstopp och nödsänkning

Aktivera nödstoppet genom att trycka på den röda nödstoppsknappen för att stoppa höjningen eller sänkningen av bommen. Återställ funktionen genom att vrida nödstoppsknappen medurs.

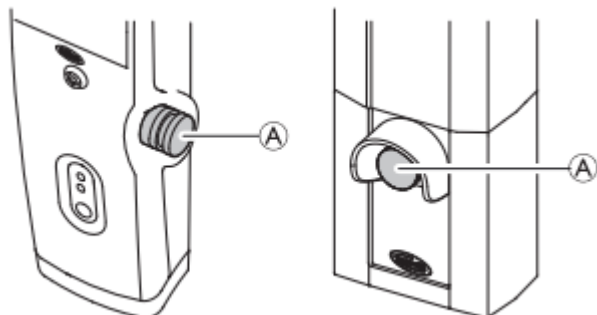

Nödsänkning

Om manöverdosan inte fungerar kan bommen sänkas genom att trycka på den runda knappen för nödsänkning.

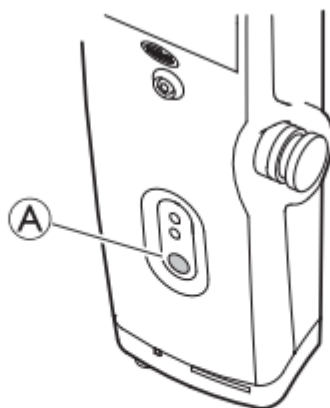


1. Sänk ned bommen genom att hålla knappen Ⓐ på elektronikenhetens framsida intryckt.
2. Avbryt sänkningen av bommen genom att släppa knappen.

Den mekaniska nödsänkningen finns som backup vid strömavbrott i lyften eller om batteriet tar slut under användning.

Viktigt! Har den mekaniska nödsänkningen använts måste personlyften kontrolleras för att åtgärda felet på elektronenheten.

Birdie® EVO och Birdie® EVO PLUS / XPLUS

1. Lokalisera det röda nödhandtaget Ⓐ som sitter på undersidan av ställdonskolven.
2. Dra försiktigt i det röda nödhandtaget Ⓐ och håll det i oförändrat läge när en säker sänkingshastighet har uppnåtts.
3. Om sänkningen inte sätter igång när nödhandtaget har dragits ut helt Ⓐ ska bommen tryckas ned samtidigt.

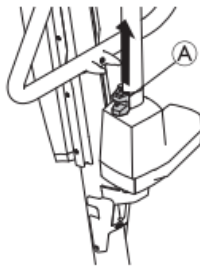

Den faktiska sänkingshastigheten beror på patientens vikt. Om hastigheten är för låg eller för hög kan den anpassas efter patientens vikt. Anpassa sänkingshastigheten:

1. Lokalisera skruven i hålet längst ner på det röda nödhandtaget Ⓐ.
2. Vrid skruven moturs för att öka hastigheten.
3. Vrid skruven medurs för att sänka hastigheten.

Skötsel

Omvårdnadspersonalen ansvarar för att lyften rengörs och kontrolleras enligt bruksanvisningen. Detta skall göras vid behov dock minst en gång/månad.

Lyften ska ställas på underhållsladdning när den inte används.

Personlyftar besiktigas via Dalarnas hjälpmedelscenter (DHC) 1 gång/år enligt avtal.

Tänk på att: Vid frågor eller om lyften är trasig kontakta arbetsterapeut el. sjukgymnast/fysioterapeut.

Läs även tillverkarens bruksanvisning:

https://www.invacare.se/sites/se/files/csv_migration/product_docs/technical_docs/DTEC012384_60128530~E.pdf

Eller scanna QR-koden.

