

## Användarmanual Mobil personlyft Guldmann

### Enkel instruktion vid fel. Kolla alltid innan kontakt med REHAB

- **Kontrollera att nödstoppet inte är intryckt.**
- **Kontrollera att laddningssladden ej sitter i eluttaget.**
- **Kontrollera att kablarna till kontrollboxen är rätt anslutna.**
- **Kontrollera att batteriet är laddat.**
- **Rensa hjulen på hår och smuts.**

### Användning


Alla personlyftar utprovas individuellt för varje brukare av arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut.

Personlyft är ett hjälpmedel som skall användas när ingen annan förflyttningsteknik är möjlig. Med undantag vid akuta fall.

Vid användning av personlyft krävs rätt lyft och rätt sele till varje brukare.

All personal som använder personlyft skall ha fått instruktion om hur personen skall förflyttas och hur personlyften skall hanteras.

Två personal bör vara närvarande vid lyft. En vid lyften och en vid personen. Förflyttningsavståndet med en personlyft skall vara så kort som möjligt.

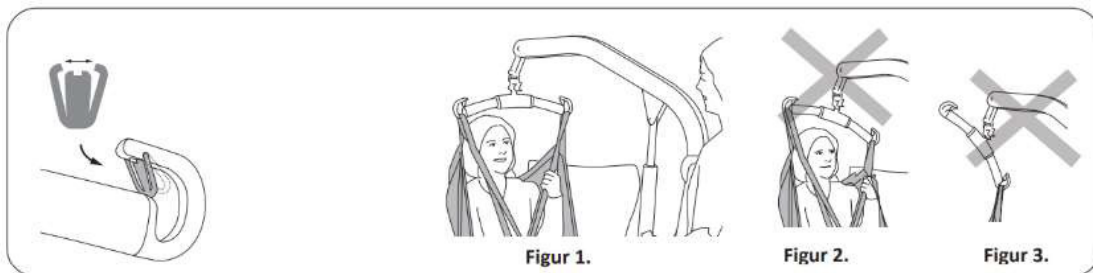

**Montering av urkrokningskydd**  
Efter monteringen kontrollerar du att de fjäderbelastade spärrarna sitter spänt mot lyftbygelns och rör sig fritt i lyftbygelkroken.

**Lyft på rätt sätt!**

Kontrollera alltid före lyft att:


- lyftselöglorna på lyftselen båda sidor har samma höjd
- alla lyftselöglor sitter säkert i lyftbygelns krokar
- lyftbygelns är i våg under lyftet, se figur 1.

⚠ Om lyftbygelns inte är i jämnhöjd (se figur 2) eller om lyftselöglorna är felaktigt kopplade till lyftbygelns (se figur 3) sänker du brukaren till ett fast underlag och gör justeringar enligt bruksanvisningen för den aktuella lyftselen.

⚠ Felaktiga lyft kan upplevas som obehagligt för användaren och skada lyftutrustningen! (se figur 2 och figur 3)!


**Planera förflyttningen och lyften placering innan lyftet påbörjas.**

**Lyftens position vid lyft**

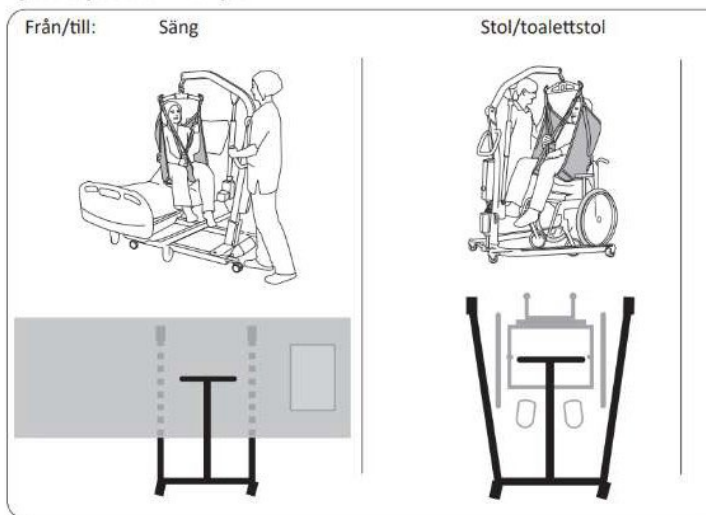

## Nödstopp och nödsänkning


Nödstoppet aktiveras genom att trycka på den röda knappen på batteriet, bild 1. När nödstoppfunktionen är aktiverad fungerar inte lyftanordningen.

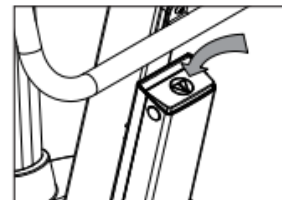

**Kontakta alltid rehabpersonalen om nödstoppet har aktiverats.**

Nödsänkningen aktiveras genom:

1. Tryck på pilknappen på kontrollboxen se bild 2. Detta fungerar som nödsänkning om handkontrollen inte fungerar.

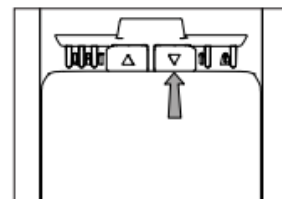

Om lyftbommen inte sänks:

2. Vrid den röda knappen på lyftbommen i pilens riktning, bild 3.



**Kontakta alltid rehabpersonalen om nödsänkningen har aktiverats.**

## Skötsel

Omvårdnadspersonalen ansvarar för att lyften rengörs och kontrolleras enligt bruksanvisningen. Detta skall göras vid behov dock minst en gång/månad.

Lyften ska ställas på underhållsladdning när den inte används.

Personlyftar besiktigas via Dalarnas hjälpmedelscenter (DHC) 1 gång/år enligt avtal.

**Tänk på att:** Vid frågor eller om lyften är trasig kontakta arbetsterapeut el. sjukgymnast/fysioterapeut.

Läs även tillverkarens bruksanvisning:[https://media.guldmann.com/cdn/5FPHlnK/manual-gl5-2-se.pdf?](https://media.guldmann.com/cdn/5FPHlnK/manual-gl5-2-se.pdf?_gl=1*sp4h0i*_up*MQ..*_ga*MTU5MjQ1ODYyNC4xNzY0NjY1MzE1*_ga_P1YXL5SW9N*czE3NjQ2NjUzMTIkbzEkZzAkDDE3NjQ2NjUzMTIkajYwJGwwJGgw)

[\\_gl=1\\*sp4h0i\\*\\_up\\*MQ..\\*\\_ga\\*MTU5MjQ1ODYyNC4xNzY0NjY1MzE1\\*\\_ga\\_P1YXL5SW9N\\*czE3NjQ2NjUzMTIkbzEkZzAkDDE3NjQ2NjUzMTIkajYwJGwwJGgw](https://media.guldmann.com/cdn/5FPHlnK/manual-gl5-2-se.pdf?_gl=1*sp4h0i*_up*MQ..*_ga*MTU5MjQ1ODYyNC4xNzY0NjY1MzE1*_ga_P1YXL5SW9N*czE3NjQ2NjUzMTIkbzEkZzAkDDE3NjQ2NjUzMTIkajYwJGwwJGgw)

Eller scanna QR-koden.

